



Résumé des instructions et des mises en garde concernant l'utilisation de l'appareil

SPLASH! – Palan aquatique pour patients

Lisez et suivez toutes les instructions de l'utilisateur figurant dans le manuel du propriétaire avant l'utilisation.

Lisez et suivez toutes les étiquettes de mise en garde et d'avertissement situées sur le palan avant l'utilisation.



Avertissements et résumé de sécurité

DANGER - LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS, INSTRUCTIONS ET DU MANUEL DU PROPRIÉTAIRE PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT



ATTENTION

- ADULT UTILISATION SEULEMENT - Utilisation par des enfants sous la surveillance d'un adulte uniquement. Seules les personnes en assez bonne santé pour pratiquer des activités aquatiques doivent utiliser le SPLASH! Les utilisateurs doivent consulter leur médecin pour déterminer si les activités aquatiques sont appropriées pour l'utilisateur.
- La ceinture de sécurité doit être utilisée à tout moment pendant le transfert de l'utilisateur.
- PAS DE SAUT / DE PLONGÉE / GRIMPER - Ne pas sauter/plonger ou grimper sur le treuil.
- La limite d'utilisation est d'UNE PERSONNE pesant moins que la limite de poids maximale de - 400lbs (181kg) pour le SPLASH! et SPLASH! Hi/Lo et 300lbs (136kg) pour le SPLASH! 300 et SPLASH! Portée étendue. A utiliser uniquement pour le transfert de l'utilisateur et non comme un palan ou une grue.
- Risque de pincement / écrasement - Toujours garder les mains et les doigts à l'écart des bras du palan.
- La batterie doit être complètement retirée du treuil et placée loin de la plage de la piscine pour être chargée.



AVERTISSEMENT

- NIVEAU DE CHARGE DE LA BATTERIE - Vérifiez le niveau de la batterie avant chaque utilisation. La batterie doit afficher VERT >50% de charge avant d'être utilisée. Lorsque le niveau de charge est JAUNE <50%, la batterie doit être complètement chargée avant l'utilisation. Lorsque le niveau de charge est indiqué en ROUGE <25%, le palan ne doit pas être utilisé et la batterie doit être complètement chargée avant d'être utilisée.
- DES DOMMAGES PEUVENT RESULTER - N'utilisez pas le siège ou le cadre du siège pour déplacer ou positionner le SPLASH!.
- DES DOMMAGES PEUVENT RESULTER - Ne laissez pas accumuler une humidité excessive dans le boîtier de la batterie, car elle peut affecter les performances de la batterie et du palan et entraîner une panne de la batterie et/ou le non-fonctionnement du palan.



24 VDC



S.R. Smith, LLC
PO Box 400
1017 SW Berg Parkway
Canby, Oregon 97013 USA
Phone: 503-266-2231
Fax: 503-266-4334
www.srsmith.com
Assemblé aux États-Unis




QNET BV
Kanstraat 19
NL-5076 NP Haaren
The Netherlands
qnet@ce-mark.com
qnet@ce-authorizedrepresentative.eu
www.ce-mark.com
www.ce-authorizedrepre-sentative.eu

TRANSFERT

- Effectuez le transfert sur le siège, en vous assurant que le poids de l'utilisateur est centré sur le siège.
- Attachez la ceinture de sécurité ou le gilet de stabilité en option.
- Faites pivoter le siège en position 12:00, au-dessus de l'eau.
- Ne pas descendre le siège dans la piscine.
- Détachez la ceinture de sécurité ou le gilet de stabilité (en option) et plongez dans l'eau.
- Retournez au siège lorsque vous avez terminé, s'assurer que le poids de l'utilisateur est centré sur le siège.
- Faites pivoter le siège jusqu'à la position de transfert originale.
- Relevez / abaissez le siège à la hauteur de transfert appropriée.
- Détachez la ceinture de sécurité ou le gilet de stabilité (en option) et retirez-vous du siège.

NOTE: Les dimensions sont données lorsque le siège est dans sa position la plus haute.

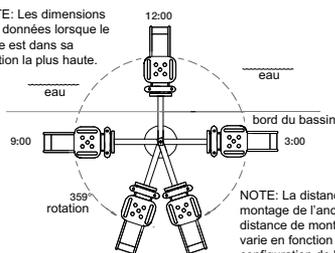

NOTE: La distance de montage de l'ancrage varie en fonction de la configuration de la plage de la piscine.

ENTRETIEN et NETTOYAGE

- Maintenez tous les composants électroniques propres et secs.
- Ne laissez pas la solution de désinfection entrer en contact direct avec la peau et les yeux.
- Reportez-vous au manuel du propriétaire pour l'entretien et le nettoyage hebdo-madaires / mensuels du palan.

Effectuez le programme suivant pour assurer le bon fonctionnement avant chaque utilisation:

Entretien effectué avant chaque utilisation	Tous les jours	Chaque semaine	Mensuel
Vérifiez le niveau de la batterie avant chaque utilisation / Chargez la batterie quotidiennement.	✓		
Essuyez le boîtier de commande et la connexion de la batterie avec un chiffon propre et sec.	✓		
Examinez le palan pour vérifier qu'il n'est pas endommagé et qu'il n'y a pas de pièces détachées ou manquantes.	✓		
Vérifiez le fonctionnement normal de tous les boutons de commande (main et boîtier de commande).	✓		
Vaporiser l'ensemble de l'engrenage avec un inhibiteur de rouille / lubrifiant à usage intensif tel que le LPS 3 - Heavy-Duty Inhibitor.		✓	
Assurez-vous que toutes les connexions de câbles sont correctement fixées.			✓
Inspecter le cadre du palan, le mât, le bras de support et le siège pour vérifier qu'ils ne sont pas rouillés.			✓
Nettoyage effectué après chaque utilisation			
Rincez le siège et la ceinture de sécurité / le gilet de stabilité à l'eau douce entre chaque utilisation - Nettoyez le siège et la ceinture de sécurité / le gilet de stabilité avec une solution désinfectante composée d'une dilution de 1:100 d'eau de Javel domestique dans de l'eau douce, puis rincez à l'eau douce et séchez l'ensemble du palan chaque jour. En cas de contamination par les excréments d'un patient ou d'un utilisateur, nettoyez immédiatement le siège, la ceinture et le gilet de sécurité avec la solution désinfectante*.	✓		
Nettoyez toutes les connexions de la batterie avec un tampon à récurer en nylon.			✓
Nettoyez toutes les surfaces métalliques avec une cire nettoiyante pour maintenir la finition du palan.			✓

* Lorsque vous utilisez la solution de désinfection, évitez tout contact direct avec la peau et les yeux. En cas d'incident de contamination, immergez la ceinture de sécurité ou le gilet de stabilité dans la solution de désinfection pendant 10 minutes, puis rincez abondamment à l'eau douce.